## **INSTALLATION RSV3 VISIODENT**

- Le PC doit être sous Windows 7 32 bits EXCLUSIVEMENT
- Télécharger le logiciel RSV Imaging ici
- http://www.aurelie.net/softs/dentaire
- Installer le logiciel dans le répertoire :
- C:\RSVImaging
- Installer la licence du capteur RSV3

Dans Logos, procédure à suivre :





Pour prendre une radio dans la fiche patient :

## **INSTALLATION RSV3 VISIODENT**

O LOGOS w v0.02 D Destaur Laurence CANE: 07/105280	
Decido S_W - V 9.02.P - Decidor Laurence CAIVE : 974103280	
> schéma actuel 👻 😒 🗱	~
🕥 🕁 favoris 🛍 nomenclature 🏔 assistants 🙏 schéma 🔪 teintier	
	י <b>י</b>
Visiodent Imaging - 1 Mr Thierry RIEMER (24/04/1964)	
Fichier Paramètres Langue ?	
Radios 🕥 Pr	rêt à l'acquisition
A AND THE ADDRESS OF ADDRESS ADDRESS OF ADDRESS OF ADDR	

Pour intégrer les radios dans Logos :



## **INSTALLATION RSV3 VISIODENT**

Scanner	Source d'acquisition [Import automatisé] Catégories			
Scanner	[Import automatisé]			
	Catégories			
	_			
	Commencer par lancer un pro	gramme externe		
Caméra				
	Début du nom du répertoire		Ť	
Source 1	Debut du nom du repertoire	C: (KSV1maging timagene		
	Portion basée sur le n°	1234 💌		
	Fin du nom du répertoire			
Source 2	Recupérer l'image la plus	récente		
	Récupérer les images de	e la journée	-A.	

C'est tout